


ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO ŠKOLY

## RYCHLÝ NÁVOD

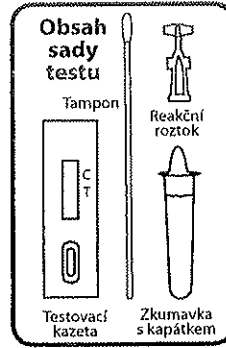


### NEGATIVNÍ


Je-li test negativní, je testovanému umožněna účast na prezenční výuce.

### POZITIVNÍ


Při pozitivním výsledku je testovaný ihned odeslán do izolační místnosti. Je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

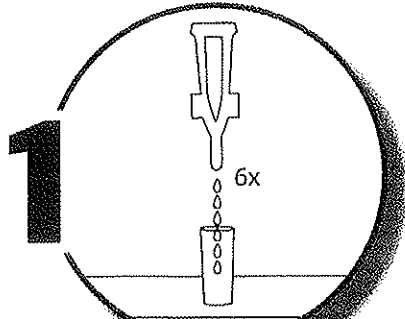

**1** Lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru. Stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

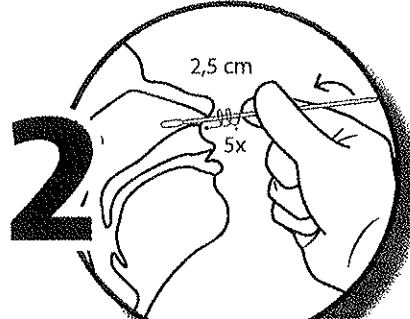


**2** Zasuňte tampon do nosní díryky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní díryky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní díryky.

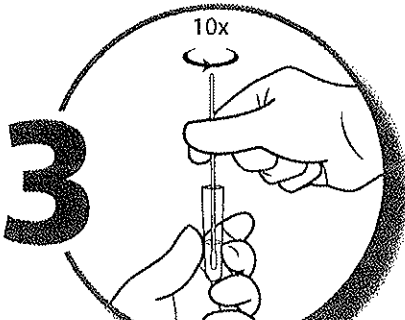

**3** Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.




1 min

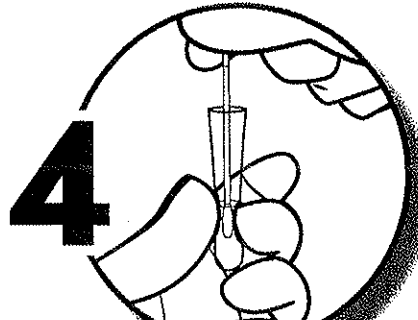

**4** Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.




1 min

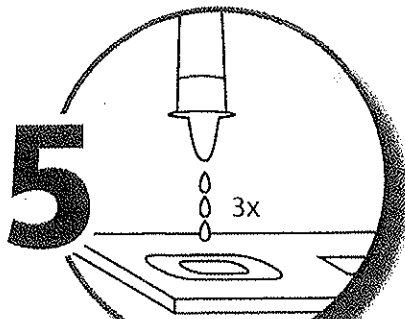

**5** Oteřete sáček a z hliníkové fólie vyjměte testovací kazetu. Nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku do otvoru pro vzorek v testovací kazetě a spusťte stopky.




15 min

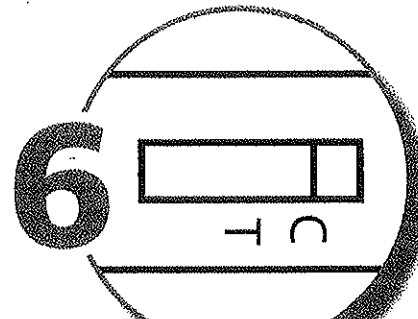


**6** Počkejte, až se v okénku na testovací kazetě objeví barevný proužek. Výsledek by měl být přečten za 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.


### Interpretace výsledků

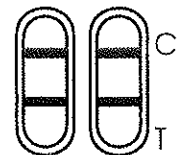

Pozitivní

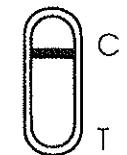

Negativní

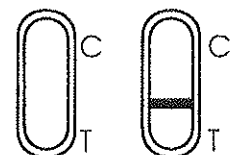

Neplatný